




# TypeSpeak


## Nieuw: TypeSpeak

TypeSpeak is een nieuw lid van de TouchSpeak-familie, gericht op mensen die problemen hebben met het vinden van woorden, maar nog wel letters en woorden kunnen herkennen. Met TypeSpeak kan op een tablet of smartphone een bericht worden samengesteld om uit te laten spreken met een computerstem, of te worden gedeeld via bijvoorbeeld e-mail of Whatsapp.

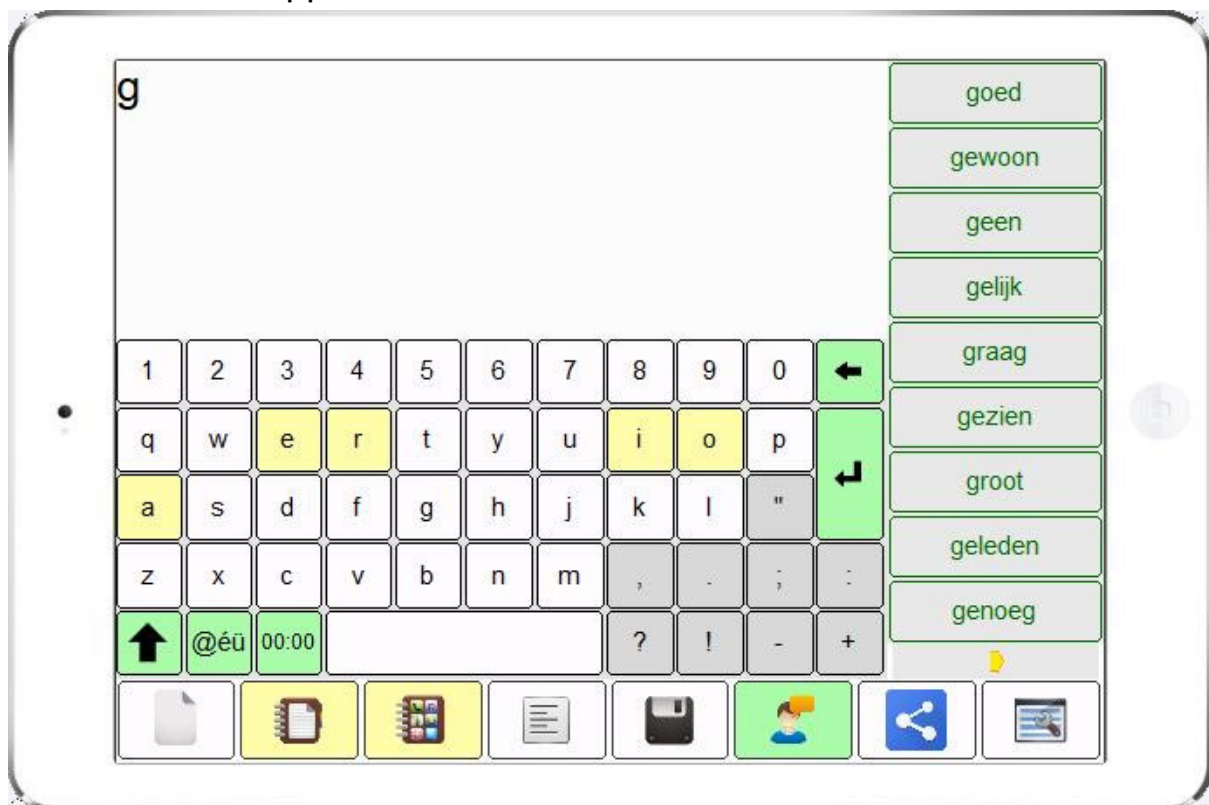

Bij het maken van een bericht worden mensen op verschillende manieren ondersteund. Letters die waarschijnlijk de volgende letter van het woord zullen zijn lichten geel op op het toetsenbord. Daarnaast kent TypeSpeak woordvoorspelling, gebaseerd op het Corpus Gesproken Nederlands. Verschillende woordsoorten (werkwoord, zelfstandig

naamwoord, etc) kunnen daarbij een eigen kleur krijgen, als dat helpt bij de woordvinding voor een specifieke gebruiker.

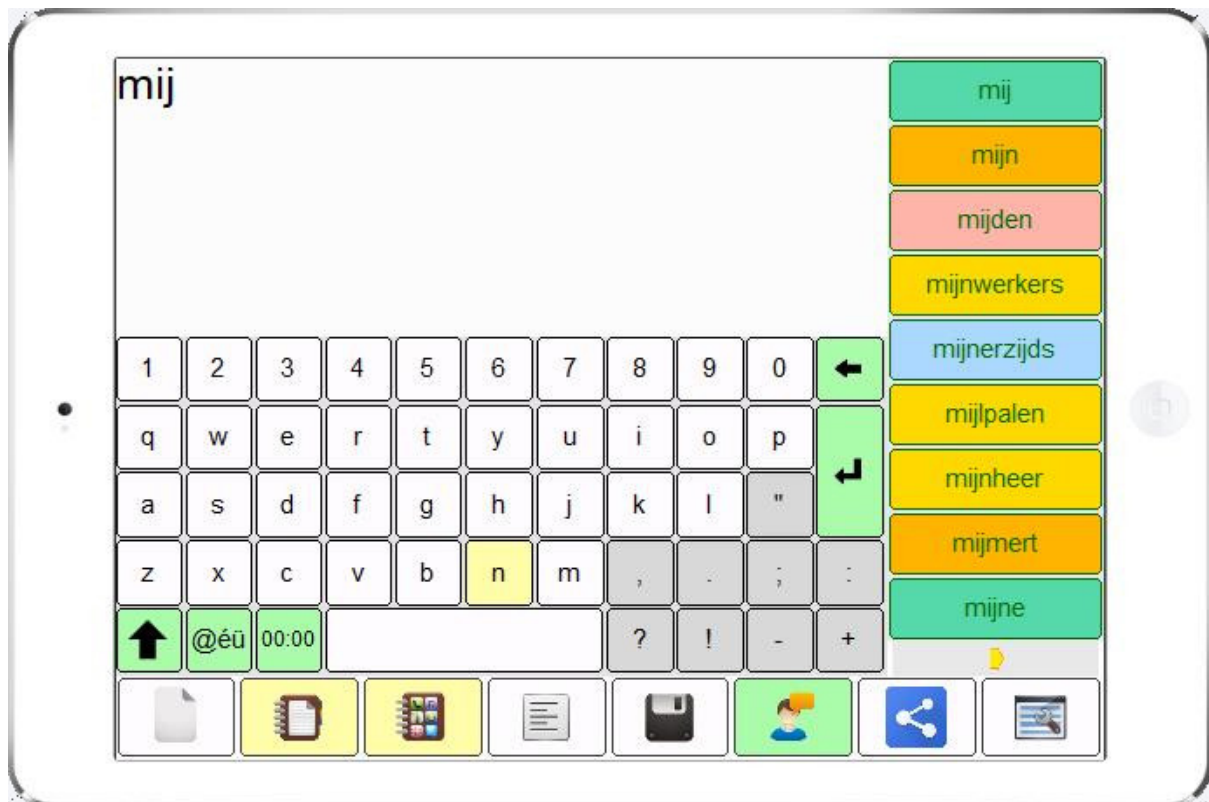


TypeSpeak kent ook twee vocabulaires waarin een woord of zin kan worden opgezocht. Als eerste is het het vaste vocabulaire met uitingen die op een standaardmanier zijn gecategoriseerd. Dit vocabulaire kan niet door de gebruiker worden aangepast, maar het wordt wel geactualiseerd op de cloud server van TouchSpeak. Zo is er nu een categorie uitingen over corona, die hopelijk snel niet meer nodig zal zijn en verwijderd zal worden.




Typespeak kent de mogelijkheid om woorden uit een vocabulaire te vervoegen, via een 'knop op de knop'. Denk hierbij aan meervouden of werkwoordsvervoegingen. Ook bijvoeglijke naamwoorden kunnen vervoegd worden.



Het persoonlijke vocabulaire is een vocabulaire dat zelf kan worden samengesteld. Er is al een stukje gemaakt, maar dat dient vooral als voorbeeld.

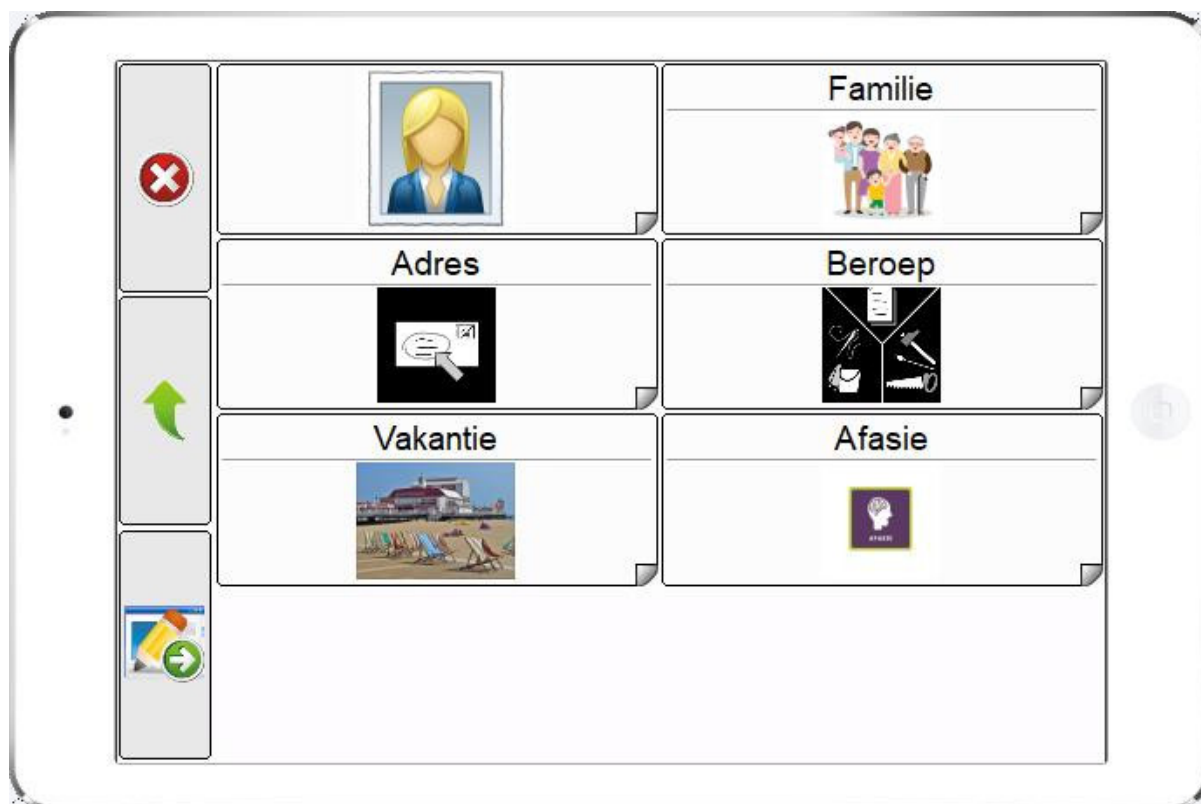

Het bewerken kan op de tablet of smartphone zelf. Dat zal in de praktijk vooral door een begeleider gebeuren.

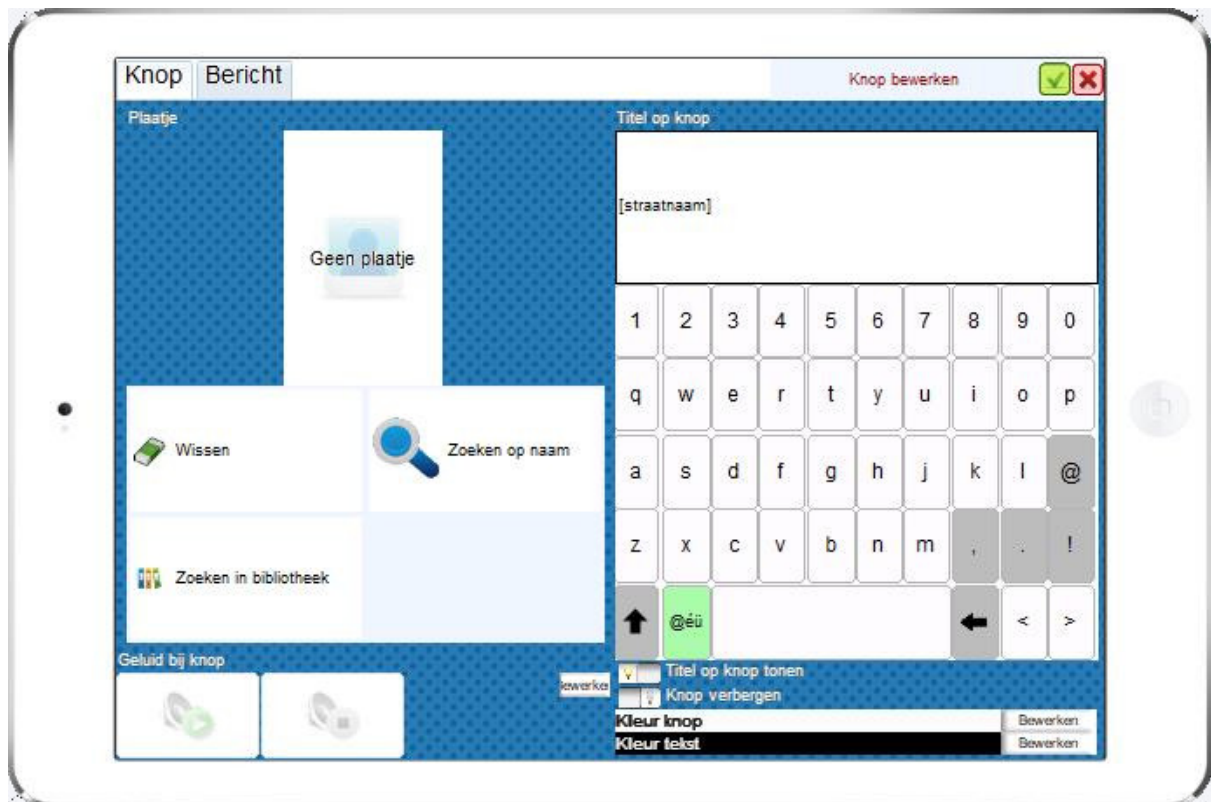

Getypte berichten kunnen ook worden opgeslagen voor later gebruik, om bijvoorbeeld een gesprek te kunnen voorbereiden. Het opslaan van een bericht gaat door één druk op een knop. De lijst met opgeslagen berichten kan desgewenst automatisch worden ingedeeld op het tijdstip van opslaan.



TypeSpeak is verkrijgbaar als app; in zowel de App Store van Apple als de Google Play Store. De eerste 30 dagen zijn gratis, daarna kan gekozen worden voor een doorlopend of pre-paid abonnement.

Ook kan TypeSpeak verstrekt verkregen worden door de zorgverzekeraar. Dat gaat op min of meer dezelfde manier als bij TouchSpeak: de aanvraag moet gedaan worden via rdgKompagne, die op hun beurt vanzelf weer bij TouchSpeak.nl terecht komen.